


SKG Oční masážní přístroj ES300

SKG

Eye Massager  
ES300

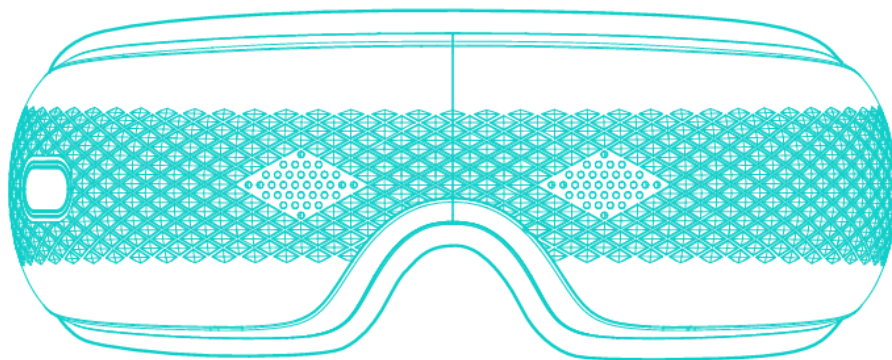

USER MANUAL

## Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze na oblast očí a na čistou pokožku.
- Nevhodné pro děti, těhotné ženy a osoby se závažnými zdravotními problémy (např. po operaci očí, glaukom, záněty).
- Nepoužívejte při řízení ani během spánku bez dozoru.
- Nepoužívejte po požití alkoholu.
- Nepoužívejte při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí.
- Přístroj není vodotěsný – neponořujte do vody.
- V případě nepříjemných pocitů okamžitě přestaňte používat.

## Baterie

- Obsahuje lithium-iontovou baterii.
- Nabíjejte pomocí USB kabelu (5 V).
- Nenabíjejte v blízkosti tepla ani ohně.
- Baterii nerozebírejte a nepropichujte.
- Při likvidaci odevzdejte do sběrného místa.

## Použití

- Nastavte elastický pásek a nasad'te přístroj na oči.
- Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko 2 sekundy.
- Přepínání režimů: krátkým stiskem tlačítka.
- Bluetooth: zapněte zařízení a připojte se (automatické párování).
- Přístroj se automaticky vypne po cca 15 minutách.

## Režimy

- Relax: vzduchová komprese + teplo + hudba
- Ochrana očí: vzduch + teplo + hudba
- Vitalita: silnější komprese + hudba
- Dynamický: komprese + hudba
- Spánek: teplo + hudba

## Údržba

- Čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte alkohol ani agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Skladujte na suchém místě.
- Doporučené použití: max. 30 minut denně.

## Prohlášení

- Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
- Zařízení je určeno pro běžné nošení na těle a splňuje limity pro vystavení RF záření.