

SKG Očný masážny prístroj KS700-E



Bezpečnostné upozornenia

- Používajte iba na oblasť očí a na čistú pokožku.
- Nevhodné pre osoby s očnými ochoreniami (napr. glaukóm, šedý zákal, odlúčenie sietnice).
- Nepoužívajte pri šoférovaní ani počas spánku.
- Nepoužívajte po požití alkoholu.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani vo vode.
- V prípade nepríjemných pocitov ihneď prestaňte používať.

Batéria

- Obsahuje lítium-iónovú batériu.
- Nabíjajte pomocou kábla USB-C (5 V).
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.

- Batériu nerozoberajte ani nepoškodujte.
- Likvidujte ekologicky v zbernom mieste.

Použitie

- Nasad'te si prístroj na oči a nastavte popruh.
- Zapnutie: podržte tlačidlo približne 1,5 sekundy.
- Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla.
- Dvojitým stlačením zapnete/vypnete hudbu.
- Bluetooth: pripojte zariadenie prostredníctvom aplikácie „Future Wear“.
- Prístroj sa po určitej dobe používania automaticky vypne.

Režimy

- Kompresia vzduchu
- Vibrácie
- Teplý/studený obklad
- Viac režimov kombinujúcich masáž a teplotu

Údržba

- Čistite mäkkou, jemne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte alkohol ani chemické čistiace prostriedky.
- Neponárajte do vody.
- Skladujte na suchom mieste.
- Odporúčané použitie: max. 30 minút denne.

Vyhlásenie

- Zariadenie spĺňa príslušné európske normy a smernice.
- Určené na bežné použitie na tele.